



PANTALLA DE OPTOTIPOS

OPTICARE – PEDRO FAULHABER SRL

GUIA RAPIDA DE USO

1- Presionar  para encender la pantalla.

2- Presionar  (esta condición tiene un tiempo, pasado dicho tiempo volver a presionar la tecla)


3- Posicionarnos en **USB** con  y seleccionamos con 



4- Posicionarnos en **FOTOS** y seleccionamos.

5- Posicionarnos en **CARTILLAS** o **IMAGENES** y seleccionamos.

6- Posicionarnos en **LETRAS** (por ejemplo) y seleccionamos.

7- Posicionarnos en el **CHART** que deseemos (observando la información en la derecha de la pantalla)

y seleccionamos. Luego podemos variar la agudeza visual con  de mayor a menor o viceversa.

8- Presionamos  para volver al menú anterior, y nuevamente  para elegir una carpeta de tipo de **CHART**.

9- Para reproducir un **VIDEO** presionar  luego seleccionamos **USB ---> VIDEO** y seleccionamos la carpeta **VIDEOS**.

NOTA: Presionar  (visualizando un **CHART**) para observar datos de contenido.
